


Policaprolactona Solubilizada

“Reabsorbible, Biocompatible y Biodegradable”

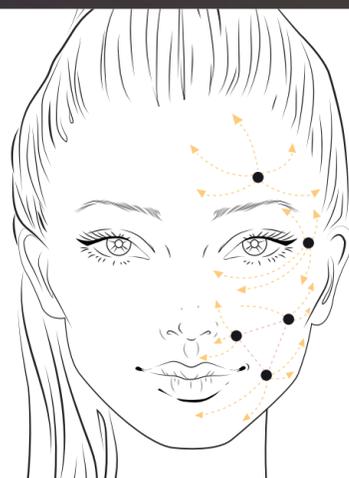

FORMA LIQUIDA PCL Que se esparce por todo el rostro

- Con pocos puntos de aplicación.
- No es necesario dar forma en el lugar de la aplicación.
- Suave masaje después de la aplicación es suficiente.
- Recuperación del volumen en los lugares inyectados en muy poco tiempo.

RESULTADOS



4 sesiones con intervalo de 4 semanas



12 días después de la 1ª sesión



12 semanas después de la 2ª sesión



3 sesiones con intervalo de 4 semanas

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- 1.-Usar en paciente mayores de 18 años
- Evitar su uso en:
- 2.-Paciente que presentó anafilaxia a materias primas de relleno.
- 3.-Pacientes con trastornos hemorrágicos o con administración de agentes trombolíticos o anticoagulantes, inmunosupresores.
- 4.-Pacientes que tienen enfermedad alérgica o anafilaxia, patología granulomatosa sarcoide, paciente con endocarditis de Osler.
- 5.-Pacientes que tienden a tener cicatrices hipertróficas.
- 6.-Pacientes con antecedentes de enfermedad estreptocócica.
- 7.-Piel inflamada o infectada.
- 8.-Tratamiento láser, peeling químico o peeling.

GORGEOUS
GOURI



Conservar a una temperatura de 5°C a 25°C y se recomienda utilizarlo todo en el mismo día, justo después de abrirlo.



PRODUCTO DISTRIBUIDO POR: SIELA GROUP

☎ 960 920 958 / 970 133 160 / 946 493 980
📍 Calle Badajoz 347, San Luis - Lima
🌐 www.sielagroup.com



GORGEOUS
GOURI

GUÍA PARA EL PROFESIONAL MÉDICO

R.S. DM23346E

GOURI

Bienvenidos a la Nueva era de la Policaprolactona

Qué es la PCL (Policaprolactona)

Es un poliéster alifático perteneciente al grupo poly- α -hidroxiácido, y perteneciente también al mismo grupo que los ácidos polilácticos y poliglicólicos.

“Ganador del Premio AMWC 2022 como el Mejor Estimulador de Colágeno”

El excipiente de Gouri ES H₂O (AGUA) alcanzando así una solubilización completa. De esta manera, ofrece una aplicación más fácil y rápida, y una mayor duración por el hecho de no provocar fagocitosis. Un tratamiento que restablece el colágeno facial y mejora la calidad de la piel conforme pasan los meses y con una capacidad de seguir produciendo colágeno a largo plazo.

Seguridad

Al cabo de unas semanas, la PCL desencadena una respuesta natural en la piel, estimulando el proceso de neocolagénesis. La degradación de la PCL implantada se da por el proceso de hidrólisis, obteniendo como producto final H₂O que se termina eliminando del cuerpo en su totalidad.



R.S. DM23346E



Avanzada Tecnología

GOURI fue desarrollado como inductor de colágeno a base de PCL biocompatible, biodegradable y totalmente solubilizado, logrando así que la PCL interactúe completamente en un medio acuoso, sin necesidad de gel ni suspensión del producto en micropartículas. Esta PCL completamente solubilizada se propaga de forma radial alcanzando gran parte de la superficie de la piel. Este relleno dérmico forma una extensa matriz 3D que le permite a la PCL persistir en el cuerpo por más tiempo antes de su fagocitosis, permitiendo generar una síntesis de colágeno en la piel completamente eficaz, sin necesidad de una inyección en múltiples puntos.

Productos de alto contenido en Polímeros



GOURI primera PCL completamente solubilizada



	OTROS PRODUCTOS DE PCL	OTROS PRODUCTOS DE ÁCIDO HIALURÓNICO	GOURI
CARACTERÍSTICAS	Neo-colagénesis, efecto voluminizador, eficaz para la parte tratada.	AH (32 mg de AH de alto peso molecular y 32 mg de AH de bajo peso molecular).	Se extiende por sí misma de manera suave y natural. Neo-colagénesis. Eficaz en todo el rostro.
FORMACIÓN	Formación Micro - Partícula.	Gel no reticulado	Sin micro - partículas.
EXCIPIENTE	CMC.	Hialuronato de Sodio	H ₂ O.
INGREDIENTE PRINCIPAL	Gel de PCL + CMC.	Ácido Hialurónico No Reticulado	PCL totalmente líquida (estructura tridimensional).
POSIBLE EFECTO SECUNDARIO	Granuloma, necrosis.	Escasa	Escasa
VOLUMEN	1ml *2(gel CMC).	2 ml	Jeringa precargada de 1cc.
VENTAJAS	Volumen, Antiarrugas. Para un área específica.	Hidratación de la piel	Firmeza, Elasticidad Mejora la calidad de la piel. Para todo el rostro.
DURACIÓN	12 meses.	De 4 a 6 meses.	12 meses.

GUÍA PARA EL PROFESIONAL MÉDICO

R.S. DM23346E

SEGURIDAD



Reducción de aparición de nódulos y granulomas.



Disminución de complicaciones vasculares.



Estimulación de colágeno tipo L con efecto a largo plazo

BENEFICIOS

- Fórmula completamente solubilizada única en el mundo.
- Estructura tridimensional que permite persistir en el cuerpo por más tiempo.
- Difusión uniforme sobre el tejido celular subcutáneo.
- Rápida y fácil aplicación.
- Seguridad: biocompatible y reabsorbible.
- Mejora absoluta en la calidad de la piel.
- Mayor propagación.
- Infiltración de forma radial.

Protocolo de APLICACIÓN GENERAL

- 1 Punto medio de la frente, por encima del centro de la pupila del ojo.
- 2 Horizontal con las fosas nasales, a unos 2-3 cm de la nariz.
- 3 Al mismo nivel que el 2º punto, por debajo del pómulos.
- 4 Al mismo nivel que el final de la línea de los labios, situado en el centro entre el 2º y el 3º punto.
- 5 Debajo de la pupila del ojo al mismo nivel que la parte media de la nariz.

- () Inyectar en la dermis profunda
- () Inyectar 0,2 cc por punto

