

BioRePeelCl₃[®]

BIPHASIC TECHNOLOGY

Es un dispositivo médico innovador, bifásico y patentado con acción bioestimulante, revitalizante y exfoliante.

Gracias a su acción exfoliante y queratolítica, promueve la renovación celular al eliminar las células de la capa corneal externa con acción selectiva sobre los enlaces de unión de los corneocitos.

La dermofuncionalidad de los principios activos contribuye a una profunda estimulación de la replicación cutánea y los procesos biosintéticos, imprescindibles para contrarrestar los efectos del envejecimiento cutáneo y el daño oxidativo inducido por la contaminación y la radiación UV.

BioRePeelCl₃ se fabrica según los estándares farmacéuticos para garantizar los más altos niveles de calidad.

Puede utilizar BioRePeel también en sinergia con otros tratamientos para mejorar su rendimiento y resultados.

- TRATAMIENTOS INYECTABLES
(Antes de BioRePeel)
- FOTOESTIMULACIÓN
(Antes de BioRePeel)
- TRATAMIENTO TÓPICO
(Antes de BioRePeel)
- RADIOFRECUENCIA
(Después de BioRePeel)



BioRePeelCl₃[®]

FND I 6 mL (5 viales)

- Ácido Tricloroacético 35%
- Ácido Lactobiónico
- Ácido Salicílico
- Ácido Cítrico
- Ácido Tartárico
- Glicina, Prolina, Hidroxiprolina y Arginina
- Vitamina C
- Vitamina B2
- Ácido Gamma-Aminobutírico

PROTOCOLO DE USO: Colocar el producto en la parte a tratar cada 7-12 días durante 4 sesiones dependiendo de la evaluación médica y los objetivos del tratamiento.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: De 3 a 5 minutos según la percepción del paciente.



BioRePeelCl₃[®]

BODY I 12 mL (3 viales)

- Ácido Tricloroacético 50%
- Ácido Lactobiónico
- Ácido Salicílico
- Ácido Cítrico
- Ácido Tartárico
- Glicina, Prolina, Hidroxiprolina y Arginina
- Vitamina C
- Vitamina B2
- Ácido Gamma-Aminobutírico

PROTOCOLO DE USO: Colocar el producto en la parte a tratar cada 10 a 15 días durante 4 sesiones dependiendo de la evaluación médica y los objetivos del tratamiento.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: De 5 a 10 minutos según la percepción del paciente.



DM20930E



DM20930E

BioRePeelCl₃ es un sistema bifásico, la fase azul es LIPOFÍLICA y la amarilla es HIDROFÍLICA.

FASE LIPOFÍLICA

ACCIONES ESTABILIZANTES Y PROTECTORAS: Previene la oxidación del ácido tricloroacético y estabiliza la formulación separando la fase acuosa de la atmósfera oxidante dentro de la ampolla. En consecuencia, mejora el rendimiento y la eficacia del producto.

ACCIONES DE FILMACIÓN Y VEHICULACIÓN: Reduce la evaporación transepidérmica del agua y ayuda a la vehiculación de los principios activos.

ACCIÓN HIDRATANTE: Incrementa la hidratación mediante mecanismos directos e indirectos.

ACCIÓN REGENERADORA: Restaura y mantiene la película hidrolipídica cutánea.

ACCIÓN HIDRATANTE: Incrementa la hidratación mediante mecanismos directos e indirectos.

FASE HIDRÓFILICA

ACCIÓN BIOESTIMULANTE: Estimula la actividad de los fibroblastos y activa los procesos de proliferación cutánea y biosintéticos.

ACCIÓN REVITALIZANTE: Incrementa la regeneración celular y la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico.

ACCIÓN QUERATOLÍTICA Y EXFOLIANTE: Elimina las células externas del estrato córneo rompiendo los enlaces de adhesión de los corneocitos. Este proceso promueve la penetración de principios activos.


ACCIÓN ANTIEDAD Y ANTIOXIDANTES: Reduce las líneas de expresión mediante la neutralización de los radicales libres.

ANTI ACNÉ, COMEDONES Y POROS AGRANDADOS: Ayuda a combatir el acné, elimina los comedones y tiene un efecto astringente en los poros dilatados.




BioRePeelCl₃[®]

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

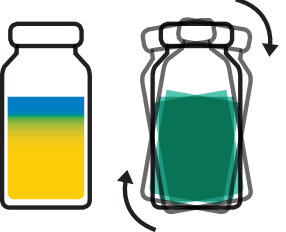

1. Agite la ampolla durante unos segundos hasta que el color se vuelva verde para una emulsión temporal.

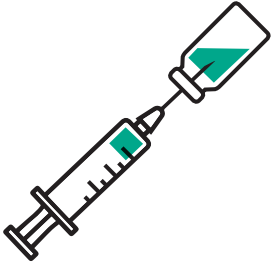

2. Con una jeringa, precargue la cantidad de producto que se usará en cada zona a tratar. **RETIRE LA AGUJA.**



3. Aplicar el producto con guantes de nitrilo sobre la zona tratada y masajear hasta su total absorción.



4. Pasado el tiempo de exposición, limpiar, con cuidado, la zona tratada con un paño en abundante agua hasta retirar por completo el producto.

Nota: Después de unos minutos, el producto volverá al estado bifásico inicial. Es necesario agitar la ampolla para integrarlo antes de cada uso.

ZONAS DE APLICACIÓN

FND I 6 mL (5 viales)

- Rostro
- Cuello
- Escote

BODY I 12 mL (3 viales)

- Manos
- Codos
- Glúteos
- Rodillas
- Pies
- Axilas
- Zonas íntimas



VER VIDEO

RESULTADOS Antes y después

ACNÉ



MELASMA



4 sesiones / BioRepeel FND / 3 meses

ESTRÍAS



RESEQUEDAD



3 sesiones / BioRepeel BODY / 4 meses

MANCHAS



REJUVENECIMIENTO



2 sesiones / BioRepeel FND/ 2 meses

Advertencias y Precauciones

- Solución médica profesional para uso externo.
- Evitar en contacto con ojos, mucosas y uñas. En caso de contacto accidental en ojos, lavar con abundante agua o lavados oculares.
- Eliminar como residuo peligroso como los requisitos obligatorios, clase de peligro : HP4, HP5, HP6, HP14.
- En caso de utilización el producto, no conforme con los protocolos y destino de uso del producto, el usuario médico profesional asume la responsabilidad del uso no correcto, a sabiendas de cuáles son los beneficios y riesgos vinculados a la utilización y la finalidad de uso no indicadas.
- No utilizar en caso que se compruebe sensibilidad a los componentes ni en pacientes alérgicos a los salicilatos.
- Puede producirse un ligero enrojecimiento de la piel que desaparecerá en 24 - 48 horas tras el tratamiento.
- No utilizar el producto si están en curso patologías y/o infecciones de la piel como dermatitis o herpes.
- Utilizar con precaución en pacientes que presentan queloides.
- No utilizar durante la etapa de embarazo o de lactancia.



DISTRIBUIDO POR:
SIELA GROUP
960 920 958 / 970 133 160
Calle Badajoz 347, San Luis - Lima
www.sielagroup.com



DM20930E

BioRePeelCl₃[®]

BIPHASIC TECHNOLOGY